



Для совершенной ингаляции


  
**SALINA NOVA**  
Modulare Inhalation



Высококачественная ингаляция



**SALINA NOVA**  
Modulare Inhalation

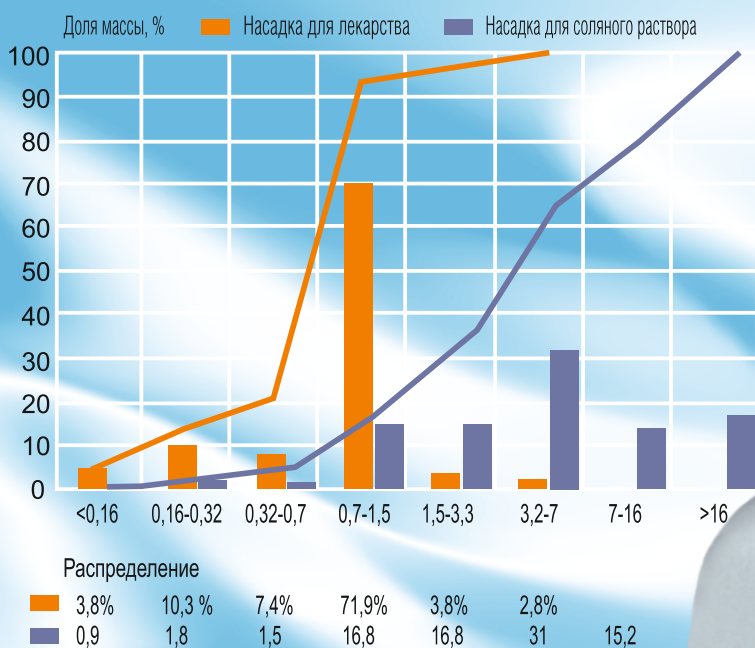

Экспертное измерение диапазона размеров капель  
 Метод измерения: определение размеров с помощью импактора по Бернеру  
 Измерение:  
 Специализированная больница монастырского сообщества проф. д-р Келер



## Ингаляционная терапия без границ

- Сухое распыление
- Влажное распыление
- Теплое распыление (температура тела)
- Холодное распыление (комнатная температура)
- Ингаляция смесью различных средств
- Ингаляция по времени
- Ингаляция по количеству средств (дозированно)
- Ингаляция посредством импульса давления
- Ингаляция с помощью вибрации

«SalinaNova» выступает за преемственность, инновационное развитие и сохранение того, что проверено временем.

«SalinaNova» поставляется с 1-3 насадками-распылителями и может использоваться в индивидуальном порядке или в качестве системы для коллективного пользования.

Многие комплектующие «Salina» могут также использоваться для «SalinaNova».

Специально разработанная для SalinaNova цифровая техника управления с гладкой сенсорной клавиатурой и интегрированным светодиодным дисплеем позволяет обслуживать прибор на уровне интуиции и блокирует неверный выбор лечения во время активного терапевтического процесса. Понятные символы на кнопках клавиатуры заменяют текстовый переключатель.

Кожух и сенсорная клавиатура легко чистятся, устойчивы к обычным моющим средствам и являются предпосылкой для оптимальной гигиенической безопасности. Процесс подготовки для комплектующих деталей всей системотехники признан независимой лабораторией.

Строгий учет экономических аспектов при разработке «SalinaNova» позволил сделать производственные затраты и косвенные расходы незначительными.



ПЛАНИРОВАНИЕ  
УСПЕШНОЙ ТЕРАПИИ

# Безопасность и гигиена благодаря современной технике



Ингаляционная система «SalinaNova» крепится к стене. Установленный кожух закрывается, что исключает несанкционированный доступ к находящейся внутри технике. Корпус легко откидывается при необходимости контроля и облегчает проведение технических и сервисных работ




Если пациент без предупреждения прекращает процедуру, средства ингаляции бесконтрольно попадают в помещение. Встроенная кнопка СТАРТ/СТОП останавливает лечебную процедуру: гигиеническая безопасность оптимизируется и это позволяет избежать загрязнения окружающей среды.



Во время действия одного терапевтического режима, другие режимы не активируются, (ошибочный) ввод блокируется блоком управления. Во время действия одного терапевтического режима, другие режимы не активируются, (ошибочный) ввод блокируется блоком управления.




Модульная конструкция позволяет интегрировать позднее другое дополнительное оборудование.

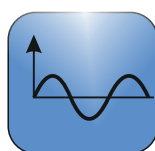

ADV – Аэрозольный вибратор импульса давления для использования при воспалительных нарушениях евстахиевой трубы, устья, придаточных пазух носа, обонятельной зоны носа до и после операции. Манометр с плавной регулировкой пульсового давления. Автоматически подключается регулируемая функция вибратора.



Аэрозоль Ручное распыление  
Для распыления особых медикаментов минимальными дозами посредством сжатого воздуха.  
Функция активируется/деактивируется кнопкой СТАРТ/СТОП.

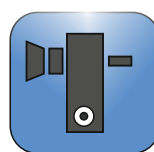

Душ носоглотки  
Для промывания и чистки носоглотки при сухости и образовании корки. Функция активируется/деактивируется кнопкой СТАРТ/СТОП.



## Дополнительное оборудование (опции)

## Технические данные (основное устройство)

Сетевое напряжение	230 В/50-60 Гц/ неразъемное соединение
Предохранительные устройства	24 В – 1,6 А / 230 В – 0,315/1,0 А
Потребляемая мощность	200 Вт макс.
Рабочее давление	1,8 кПа / макс. 2,2 кПа
Необходимое количество воздуха (на дюзу)	20 л/мин
Подсоединение	3/8 внутренняя резьба (вровень со стеной)
Температура распыления	ок. 37°C
Размеры ВхШхГ	470 x 460 x 420 мм (без шланга для распыления)
Масса	16 кг
Классификация	CE 0482
Подсоединение	3/8" внутренняя резьба



Schumacher & Partner GmbH  
Medizintechnik | Medical Wellness  
Langgasse 70  
D-56132 Dausenau  
T +49 (0)2603 / 96 09 -0  
F +49 (0)2603 / 96 09 30  
info@schumacher-medizintechnik.de  
www.schumacher-medizintechnik.de



Официальное представительство  
Schumacher&Partner GMBH Germany в  
России  
ООО Фирма «МИТТЕК» Адрес: 105318,  
г. Москва, ул. Мироновская, д. 33  
www.mittek.ru E-mail: firma@mittek.ru  
Телефон: +7 (495) 129-00-28